



KASUTUSJUHEND

Loe hoolikalt läbi pakendi infoleht enne toote kasutamist. Hoia pakendi infoleht alles, et vajadusel saaksid seda uuesti lugeda.

MIS ON ORALSAN OXYGEL JA KUIDAS SEDA KASUTATAKSE?

Oralsan Oxygel on hammaste puhastuse protseduuril kasutatav geel, mis sisaldab 11% karbamiidperoksiidi ja 1% dinaatrium EDTA-d. Geeli kasutatakse ülemisel ja alumisel igeme piirkonnal hambakatu ja -kivi pehmemdamiseks ja kiiremaks eemaldamiseks.

- Aitab kiiremini ja efektiivsemalt lõhustada ning eemaldada hambakivi, toimeaeg vaid 1-2 minutit
- Kiirendab suuhügieeni puhastuse protseduuri
- Vähendab lenduvate aerosoolide teket suupuhastuse protseduuril
- Toote komplekt sisaldab 5 ml geeli tuubis ja 12 otsikut geeli peale kandmiseks

Peale geeli pealekandmist vabaneb mõne sekundi järel vesinikperoksiid, mis avaldab mõju biofilmile ning lagundab hambakivi. Antud geeli kasutamine aitab kiirendada suuhügieeni protseduuri nii käsiinstrumendi kui ka ultraheli skeileri kasutamisel. Lisaks kasutab ultraheli skeiler vähem vett, mille tõttu lendub õhku ka vähem aerosoole.



Vesinikperoksiidil on õrn hemostaatiline toime. Oralsan OxyGel sisaldab ka naatriumhüaluroonaati, mis kiirendab igemete paranemist peale suuhügieeni protseduuri. Kaaliumnitraat aitab vähendada hammaste tundlikkust protseduuri ajal. Suuhügieeni protseduur on nüüd palju kiirem ja valutum patsiendile.

ORALSAN OXYGELI KASUTAMINE

Kinnita pealekandmisotsik geeli tuubi otsale ning kanna väikeses koguses geeli igemetasku äärde ja hamba pinnale. Lase geelil toimida 1-2 minutit ning seejärel alusta hammaste süvapuhastuse protseduuriga.

ORALSAN OxyGeli võib kasutada ka enne hammaste valgendamist. Kanna geel hamba pealispinnale ning harja hamba pinnad üle, nii saad lihtsalt eemaldada hamba pinnalt biofilmi enne valgendust.

KOOSTIS

„Karbamiidperoksiid, glütseriin, puhastatud vesi, dinaatrium-EDTA, akrülaat/C10-30-alküülakrülaatpolümeer, naatriumhüaluroonhape, propüleenglükool, kaaliumnitraat, naatriumhüdrosiid.“